

# Kábelezési segédlet az STM720 beszédkapcsolatos nővérhívó rendszerhez

<p><b>Központ</b> Nővérhívó központ (GEWIS44206 álló) szm.: 0,5m vagy pultba építve</p> <p>↗ Központ összekötés</p> <p><b>NK</b> Nővér készülék vagy orvosi k. (GEWIS44206 álló) szm.: 1,4m (ajtó mellé)</p> <p><b>⊗</b> Ajtólámpa (Ø65 szer. dob.) szm.: 2,2- 2,5m ajtó fölé vagy állm.-be</p> <p><b>P</b> Páciens egység (Ø65 szer. dob. vagy sávba) szm.: 1,2m az ágy jobb vagy bal széléhez</p> <p><b>H</b> Mellék helyiségi húzókapcsoló (Ø65 szer. dob) szm.: 1,8-3m WC-től és/vagy zuh.-tól elérhető</p> <p><b>T</b> Mellék helyiségi törőkapcsoló (Ø65 szer. dob) szm.: 1,4m (ajtó mellé)</p>	<p>----- Folyosói gerinckábel (Müdn23): - 2x1,5mm2 MKH(MZSL); 3xCAT5(Patch - hajlékony) - 5x1 árnyékolt kábel (erenként árnyékolt)</p> <p>----- Központ összekötő kábel (Müdn13): - 1 x HM110-4 (4 eres telefonkábel - lapos) - 5x1 árnyékolt kábel (erenként árnyékolt)</p> <p>----- Kórtermi gerinckábel (Müdn 23): - 1 x HM110-8, 1x MZS(2x0,35mm2)/ágy (8 eres telefonk. - lapo</p> <p>----- Ajtólámpa kábel (Müdn13): - NK és ajtó lámpa között: 1 x HM110-6 (6 eres telefonk.- lapos) - ajtó lámpa és H között: MZS(2x0,5mm2)</p>
---	---

